


# Bruksanvisning GS-257

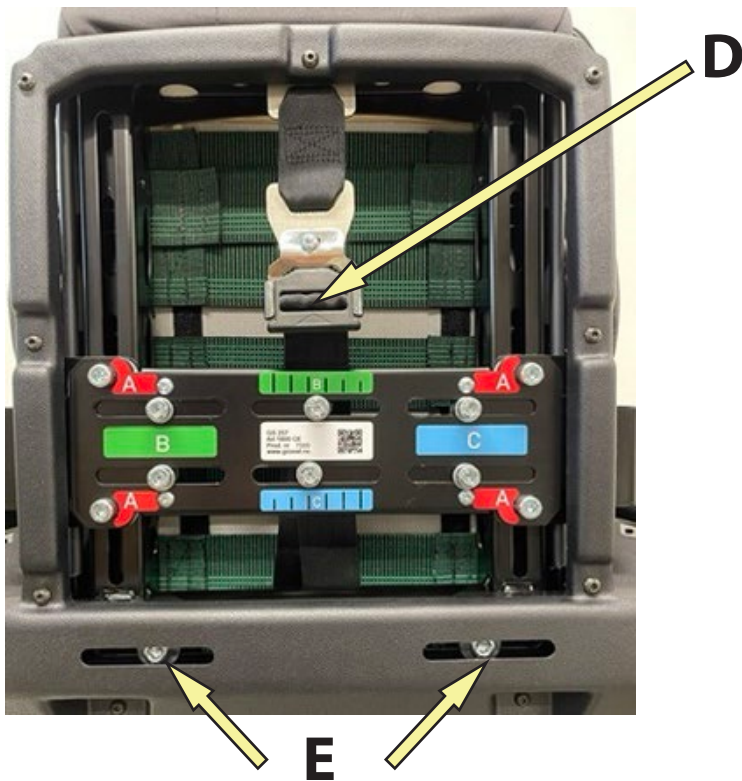

## A – Høydejustering rygg

Løsne 4 skruer gult felt, juster opp eller ned

## B – Sidevange, bredde venstre

Løsne 3 skruer, grønt felt

## C – Sidevange, bredde Høyre

Løsne 3 skruer, blått felt

## D – Justering skrittsele 5P

Vri låsen ut, trykk inn sort del for å løsne sele

## E – Armlener, breddejustering

Løsne 2 skruer



## F – Seleavlaster

Monteres H eller V side

## G – Nakkepute m. foldefunksjon

Vinger kan også bøyes

## H – Rygg øvre 45 grader

Skruløs 2 skruer, velg vinkel

**Skrud godt til.**

## I – Sidevange høydejustering.

Åpne glidlås løsne 2 skruer.

## J – Armlene, justeringsratt.

## K – Justeringspak, ryggvinkel

## L – Sittedybde

Løsne 2 skruer begge sider av setet. Skli ryggen frem eller tilbake.

**Skrud godt til.**

## M – Justeringspak, tilt sete

## N – Fot-støtte, høydejustering

Løsne 2 skruer.

## O – kne/lårstøtter, breddejustering

løsne 2 skruer.